

Wir gratulieren zum Kauf Ihres neuen IQcare Notrufbutton aus dem Hause IQfy GmbH.

Bei sachgerechter Handhabung können Sie sich auf dieses Qualitätsprodukt jederzeit verlassen. Bitte beachten Sie daher die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung.

Sie haben sich für einen IQcare Notrufbutton entschieden, damit Ihre Patienten/Bewohner immer wissen, dass sie in einer Notsituation schnell und einfach Hilfe rufen können und diese auch umgehend erhalten.

Inbetriebnahme

Anlernen als eigenständiger Notruf im **Arbeitsstrom:**

1



Funkempfänger und Adapterkabel (falls im Lieferumfang enthalten) müssen verbunden sein. Stecken Sie den Funkempfänger in die Steckdose. Die CLR Anzeige blinkt grün (Anlernmodus).

2



Drücken Sie kurz und schnell 3 x hintereinander auf den Notrufbutton. LRN leuchtet jetzt dauerhaft rot. Notrufbutton und Funkempfänger bilden jetzt eine Einheit. Die Verbindung wird durch ein akustisches Signal bestätigt.

3

Verbinden Sie das Adapterkabel mit Ihrer Rufanlage! Die Anzeige auf dem Funkempfänger signalisiert die Einsatzbereitschaft mit LRN dauerhaft rot.

Anlernen als eigenständiger Notruf im **Ruhestrom:**

1



Funkempfänger und Adapterkabel (falls im Lieferumfang enthalten) müssen verbunden sein. Stecken Sie den Funkempfänger in die Steckdose. Die CLR Anzeige blinkt grün (Anlernmodus).

2



Drücken Sie einmal kurz auf die LRN Anzeige. Der Funkempfänger wird dadurch in den Ruhestrom umgestellt. Die CLR Anzeige blinkt rot.

3



Drücken Sie kurz und schnell 3 x hintereinander auf den Notrufbutton. LRN leuchtet jetzt dauerhaft rot. Notrufbutton und Funkempfänger bilden jetzt eine Einheit. Die Verbindung wird durch ein akustisches Signal bestätigt.

4

Verbinden Sie das Adapterkabel mit Ihrer Rufanlage! Die Anzeige auf dem Funkempfänger signalisiert die Einsatzbereitschaft mit LRN dauerhaft rot.

Anlernen an vorhandene Funkempfänger, wenn bereits IQcare Sensormatratzen eingesetzt werden.

Voraussetzung: Die Matratze und der vorhandene Funkempfänger sind bereits aufeinander angelernt und bilden eine Einheit.

- 

1 Durch ziehen und wieder einstecken des Funkempfängers kann dieser nur innerhalb der nächsten 30 Sekunden programmiert werden. Die LRN Taste leuchtet rot.
- 

2 Drücken Sie die LRN Taste ca. 10 Sekunden bis die CLR Taste blinkt.
- 

3 Drücken Sie jetzt 3 x schnell hintereinander auf den Notrufbutton. Die CLR Taste leuchtet kurzzeitig (ca. 2 Sek.), dauerhaft grün. Das erneute Blinken und ein akustischer Ton signalisieren, dass der Notrufbutton erkannt wurde.
- 

4 Zum Speichern der Einstellung die CLR Taste kurz drücken. Die LRN Taste leuchtet wieder dauerhaft rot.

Interessantes für die Haustechnik:

Bevor Sie einen bereits angelernten Funkempfänger einem anderen IQcare Produkt wie etwa einer Sensormatratze oder einem Sitzkissen zuordnen, setzen Sie ihn bitte in den Auslieferungszustand zurück.

Löschen aller Einstellungen (Auslieferungszustand):

1. Durch ziehen und wieder einstecken des Funkempfängers in die Steckdose kann die Einstellung innerhalb von 30 Sekunden gelöscht werden.
2. LRN Taste ca. 10 Sekunden drücken, bis die CLR Taste blinkt.
3. CLR Taste ca. 3 Sekunden drücken, bis das CLR LED aus ist.
4. Kurz darauf blinkt die CLR-Taste wieder grün. Der Funkempfänger befindet sich jetzt im Auslieferungszustand und kann entsprechend der Beschreibung neu eingestellt werden.

Wartung und Pflege:

Der IQcare Notrufbutton kann vorsichtig mit einem weichen Pflagetuch und haushaltsüblichen Mitteln gereinigt werden.

Desinfektion:

Sprühen Sie den Notrufbutton mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel ein. Eine Liste mit empfohlenen Desinfektionsmitteln kann angefordert werden: info@iqfy.de

Technische Daten:

Sendeleistung:	10 mW
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +65 °C
Relative Luftfeuchte:	0 % bis 93 %
Approbationen:	CE
Maße (D x H):	95,5 x 16 mm
Schaltweg:	2 mm
Schutzklasse:	IP 20
Sende-Telegramm:	PTM/RPS-Typ/Data-Status
	- Ein 10 - 20
	- Aus 00 - 20

Reichweite:

- Die gelisteten Weiten sind als grobe Richtwerte zu sehen
- im Freifeld ca. 300 m
 - in geschlossenen Räumen ca. 40 m
 - durch Rigips- oder Holzwände (max. 7) ca. 30 m
 - durch Ziegel- oder Gasbetonwände (max. 3) ca. 20 m
 - durch Stahlbetonwand oder- decke (max. 1) ca. 10 m

Sie haben weitere Fragen?

Unser Support steht Ihnen **24 Stunden** unter support@iqfy.de zur Verfügung.
Wir beantworten Ihre Fragen kurzfristig!

Zu den Bürozeiten, **8.00 - 17.00 Uhr**, stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung:

+49 2354 / 9449969



Innovation  made in Germany



IQfy GmbH
Am Stadion 2
58540 Meinerzhagen

fon +49 2354 / 9449969
fax +49 2354 / 9449959
mail info@iqfy.de
web www.iqfy.de

