


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der innovativen IQmat-Matratze!

Mit der neuen Sensormatratze ermöglichen Sie Ihrem Pflegepersonal eine effektive Entlastung und Zeitersparnis. Ihren Bewohnern bieten Sie Bewegungsfreiheit und Sicherheit!

Um die Möglichkeiten der IQmat Matratze zu gewährleisten, nehmen Sie die Matratze nach den folgenden Schritten in Betrieb!

BEDIENUNGSANLEITUNG

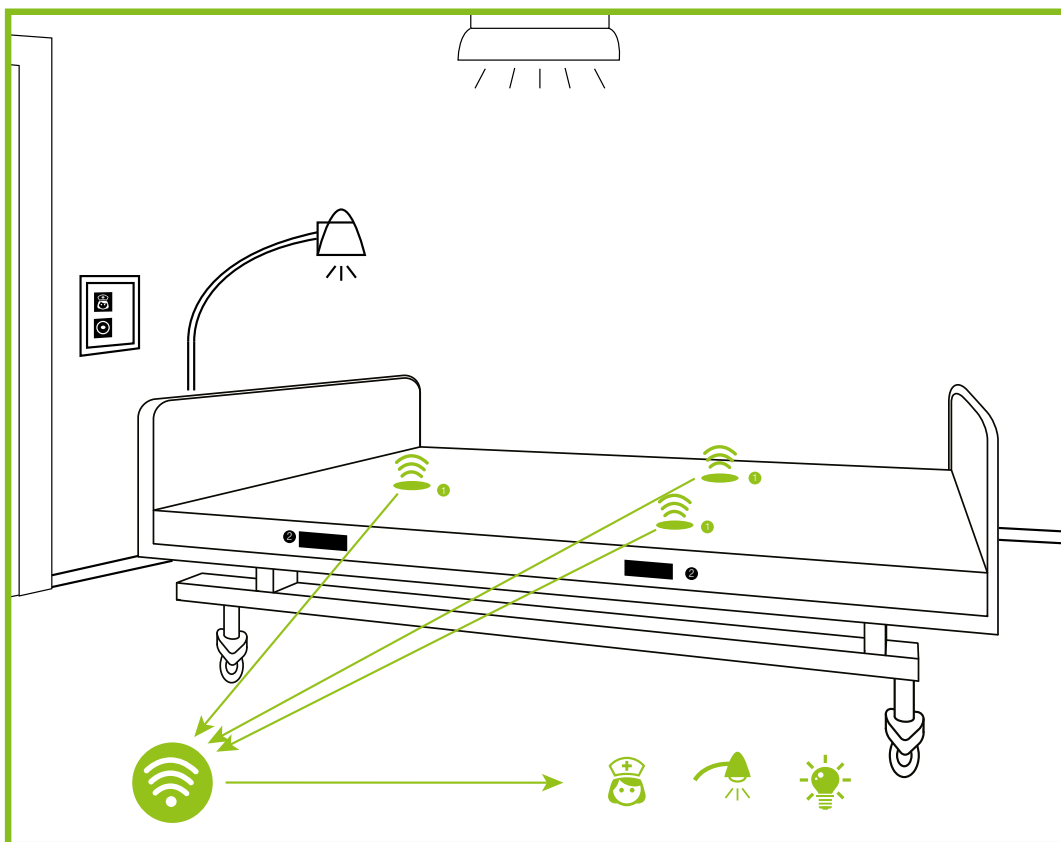

- Sensoren ① nehmen Gewichtsveränderungen wahr und registrieren ein Verlassen des Bettes
- Drucksensor ② sendet ein Signal an die Schwesternrufanlage, 📞 das DECT Telefon und den Pager
- Zeitgleich kann die Bettleuchte 🏡 und wenn gewünscht die Raumlampe 💡 geschaltet werden. Hierzu sind die entsprechenden Empfänger erforderlich, die nur auf Bestellung im Lieferumfang enthalten sind (Lichtpaket)



Die Matratze ist an Kopf- & Oberseite gekennzeichnet und muss dementsprechend richtig im Bett positioniert werden!





Wichtig!

Vor der Installation klären Sie unbedingt ob Ihre Rufanlage im Ruhestrom oder Arbeitsstrom arbeitet! Der Funkempfänger (Alarm-Switch) wird immer im **Arbeitsstrommodus** ausgeliefert!

Ruhestrom / Öffner:

1. Um den Switch in den Ruhestrommodus umzuschalten, stecken Sie den Alarm-Switch in die Steckdose und drücken Sie einmalig die LRN-Taste. Die CLR-Taste blinkt rot.
2. Verbinden Sie den Alarm-Switch mit der Schwesternrufanlage.
3. Drücken Sie 3 x in kurzen Abständen im markierten Bereich auf die Matratze.

Die Matratze befindet sich jetzt in der Grundeinstellung mit einer Sperrzeit von 10 Sekunden und ist mit Ihrer Schwesternrufanlage verbunden.


Die Sperrzeiten können Sie jederzeit, wie unten angegeben, ändern!



Arbeitsstrom / Schließer:

1. Stecken Sie den Alarm-Switch in die Steckdose und verbinden Sie ihn mit der Schwesternrufanlage.
2. Drücken Sie 3 x in kurzen Abständen im markierten Bereich auf die Matratze.

Die Matratze befindet sich jetzt in der Grundeinstellung mit einer Sperrzeit von 10 Sekunden und ist mit Ihrer Schwesternrufanlage verbunden.

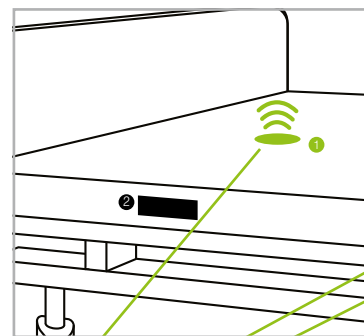

Änderungen der Sperrzeiten:

Wichtig: Dieser Vorgang muss innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen sein!

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr indem Sie den Alarm-Switch aus der Steckdose ziehen.
2. Stecken Sie den Alarm-Switch wieder in die Steckdose.
3. Drücken Sie kurz die CLR-Taste auf dem Alarm-Switch zur Änderung der Sperrzeiten. Die unterschiedliche Farbanzeige signalisiert Ihnen die Sperrzeit:

Sperrzeiten:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 10 Sekunden (Grundeinstellung) | - besonders gefährdete Bewohner |
| 15 Minuten | - leicht gefährdete oder bewegungsaktive Bewohner |
| 60 Minuten | - stabile Bewohner |



Sperrzeiten können jederzeit schnell und einfach geändert werden!

Das System übernimmt automatisch die gewünschte Einstellung / Sperrzeit! Beim Wechsel der Bewohner müssen ggf. die Sperrzeiten angepasst werden, da es sonst zu Fehlauflösungen kommen kann.

Sie haben weitere Fragen?

Unser Support steht Ihnen **24 Stunden** unter **support@iqfy.de** zur Verfügung.
Wir beantworten Ihre Fragen kurzfristig!

Zu den Bürozeiten, 8.00 - 17.00 Uhr, stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung!

